



מדריך מקוצר

/ Aerogen® Solo

High Performance Nebulizer

* מסמך זה הינו הוראות עבודה מקוצרות.
* אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.
* בכל מקרה של סתירה או חסר יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.
* מסמך זה נכתב בלשון זכר אך הכוונה לשני מינים כאחד



חיבור ב - Wye



At the Wye

4 לחץ על כפתור ההדלקה למשך שנייה ובחר תכנית של 30 דקות

5 לבחירת תכנית אינהלציה ממושכת ב-Aerogen Pro-X Controller, לחץ על כפתור ההדלקה למשך 3 שניות

6 לבחירת תכנית אינהלציה ל-6 שעות Aerogen USB Controller לחץ על כפתור ההדלקה למשך 3 שניות

1 מקם את מיכל האינהלציה ארוגן סולו במתאם החיבור

2 הכנס את המתאם עם כוסית האינהלציה לזרוע האינספירטורית של סט ההנשמה

3 הכנס את התרופה למיכל האינהלציה



Heat Moisture Exchanger



חיבור בצד היבש של מכשיר הלחות



- | | | |
|---|---|---|
| 1 | מקם את מיכל האינהלציה ארוגן סולו במתאם החיבור |  |
| 2 | מקם את המתאם עם כוסית האינהלציה בכניסה אל מיכל המים מכיוון המנשם (הצד היבש) |  |
| 3 | הכנס את התרופה למיכל האינהלציה |  |
| 4 | לחץ על כפתור ההדלקה למשך שנייה ובחר תכנית של 30 דקות |  |
| 5 | לבחירת תכנית אינהלציה ממושכת ב-Aerogen Pro-X Controller, לחץ על כפתור ההדלקה למשך 3 שניות |  |
| 6 | לבחירת תכנית אינהלציה ל-6 שעות Aerogen USB Controller לחץ על כפתור ההדלקה למשך 3 שניות |  |



אינהלציה בנשימה ספונטנית

Aerogen Ultra



- | | | |
|---|---|---|
| 1 | מקם את מיכל האינהלציה ארוגן סולו ב - Aerogen Ultra |  |
| 2 | חבר את הכבל מהבקר אל הכוסית. אם יש צורך ניתן לחבר צינור למתן חמצן בזרימה נמוכה לתחתית ה - Aerogen Ultra |  |
| 3 | הכנס את התרופה למיכל האינהלציה |  |
| 4 | לחץ על כפתור ההדלקה למשך שנייה ובחר תכנית של 30 דקות | |
| 5 | לבחירת תכנית אינהלציה ממושכת ב-Aerogen Pro-X Controller, לחץ על כפתור ההדלקה למשך 3 שניות |  |
| 6 | לבחירת תכנית אינהלציה ל-6 שעות Aerogen USB Controller לחץ על כפתור ההדלקה למשך 3 שניות | |

הנשמה לא פולשנית – מסכת BiPAP



At the Wyte

4 לחץ על כפתור ההדלקה למשך שנייה ובחר תכנית של 30 דקות

5 לבחירת תכנית אינהלציה ממושכת ב-Aerogen Pro-X Controller, לחץ על כפתור ההדלקה למשך 3 שניות

6 לבחירת תכנית אינהלציה ל-6 שעות ב-Aerogen USB Controller לחץ על כפתור ההדלקה למשך 3 שניות

1 מקם את מיכל האינהלציה ארוגן סולו במתאם החיבור

2 חבר את הכבל מהבקר אל הכוסית. מקם את הכוסית בין הצינור למסכה.

3 הכנס את התרופה למיכל האינהלציה



Heat Moisture Exchanger



אינהלציה במתן ממושך

חיבור ב - Wye



חיבור בצד היבש של מכשיר



4 פתח את מכסה מכסה כוסית האינהלציה (לא לנתק אותו מהכוסית). הברג את קצה הצינורית לכוסית והכנס את המזרק עם התרופה למשאבת מזרק

4



1 הסר את מכסה המזרק ורוקן את המזרק מאויר



5 לבחירת תכנית אינהלציה ממושכת ב-Aerogen Pro-X Controller, לחץ על כפתור ההדלקה למשך 3 שניות

5



2 חבר את הצינורית לקצה המזרק ובדוק שאין אויר במזרק



6 לבחירת תכנית אינהלציה ל-6 שעות Aerogen USB Controller לחץ על כפתור ההדלקה למשך 3 שניות

6



3 הזן את התרופה עד לקצה הצינורית שים לב מקסימום נפח צינורית הינו 3.65 ml

- מקסימום נפח צינורית מזרק הינו 3.65 ml
- קצב שחרור המירבי במתן אינהלציה ממושכת הוא עד 12 ml/hour
- בזמן מתן אינהלציה ממושכת האינהלציה פועלת באופן רציף והתרופה ניתנת בטפטוף לכוסית האינהלציה
- מומלץ לראות את אדי האינהלציה בכוסית שניתנים לסירוגין על בסיס קבוע
- כמות התרופה במיכל האינהלציה צריכה להישאר קבועה בזמן שימוש באינהלציה ממושכת
- החלף את המזרק והצינורית במידה ויש שינוי בסוג התרופה הניתנת באינהלציה ממושכת
- במידה ויש צורך להחליף מזרק כבה תחילה את משאבת המזרק ונתק את קצה הצינורית מכוסית האינהלציה




דגשים למילוי המזרק

- התרופה המיועדת למזרק האינהלציה מסופקת באמצעות בית המרקחת למטפל על מנת לתת את הטיפול המתאים
- על מנת למלא את מזרק האינהלציה הצמד את בסיס המזרק והתחל במילוי מקצה המזרק
- יש לסגור את המזרק עם הפקק למצב שבו מאכסנים את המזרק עם התרופה.



שימוש בפילטר לחות

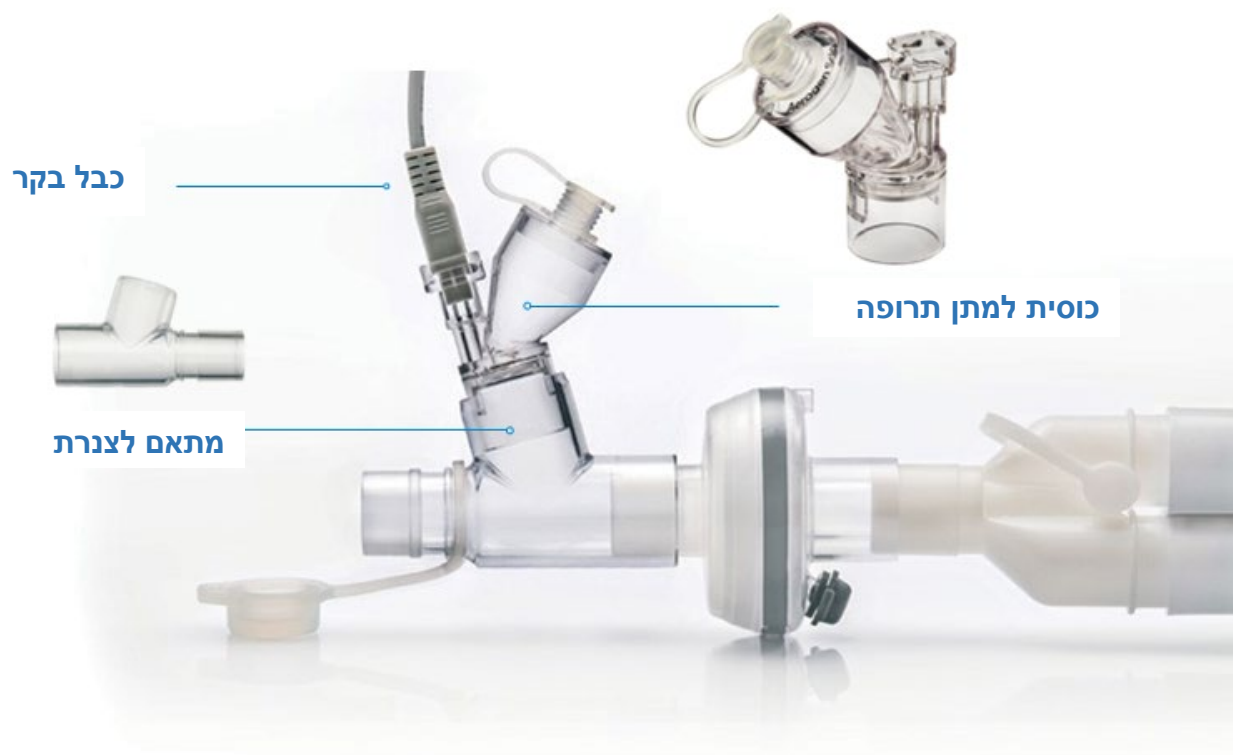

- אין להשתמש בפילטר או ב HME בין כוסיט האינהלציה לדרכי הנשימה של המטופל
- וודא שכלל הנפח של האינהלציה, המתאם וה HME מתאים לחולה ואינו משפיע לרעה על נתוני ההנשמה למטופל

HIGH FLOW בילדים



100

- | | |
|---|---|
| <p>1</p> <p>מקם את מיכל האינהלציה ארוגן סולו במתאם החיבור</p>  | <p>4</p> <p>לחץ על כפתור ההדלקה למשך שנייה ובחר תכנית של 30 דקות</p>  |
| <p>2</p> <p>מקם את המתאם עם כוסית האינהלציה בכניסה אל מיכל המים מכיוון המנשם (הצד היבש)</p>  | <p>5</p> <p>לבחירת תכנית אינהלציה ממושכת ב-AeroGen Pro-X Controller, לחץ על כפתור ההדלקה למשך 3 שניות</p>  |
| <p>3</p> <p>הכנס את התרופה למיכל האינהלציה</p>  | <p>6</p> <p>לבחירת תכנית אינהלציה ל-6 שעות ב-AeroGen USB Controller לחץ על כפתור ההדלקה למשך 3 שניות</p>  |

- * מסמך זה הינו הוראות עבודה מקוצרות.
- * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.
- * בכל מקרה של סתירה או חסר יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.
- * מסמך זה נכתב בלשון זכר אך הכוונה לשני מינים כאחד



HIGH FLOW במבוגרים



At the Wye

4 לחץ על כפתור ההדלקה למשך שנייה ובחר תכנית של 30 דקות

1 מקם את מיכל האינהלציה ארוגן סולו במתאם החיבור



Heat Moisture Exchanger

5 לבחירת תכנית אינהלציה ממושכת ב-Aerogen Pro-X Controller, לחץ על כפתור ההדלקה למשך 3 שניות



2 מקם את המתאם עם כוסית האינהלציה בכניסה אל מיכל המים מכיוון המנשם (הצד היבש)



6 לבחירת תכנית אינהלציה ל-6 שעות ב-Aerogen USB Controller לחץ על כפתור ההדלקה למשך 3 שניות



3 הכנס את התרופה למיכל האינהלציה



* מסמך זה הינו הוראות עבודה מקוצרות.
* אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.
* בכל מקרה של סתירה או חסר יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.
* מסמך זה נכתב בלשון זכר אך הכוונה לשני מינים כאחד

